

Fiches pratiques


Aide au dosage et bacs

Accessoires	Référence
Robinet pour bidon de 5 l	135 501
Pompe doseuse pour bidon de 5 l (délivre 20 ml par pression)	117 101
Clé pour bidon de 5 l	135 810
Pot doseur 50 ml	136 102
Bac rotasept®	144 030
Bac de trempage 3 l	144 307
Bac de trempage 5 l	144 407
Bac de trempage 10 l	144 507

Tableau de dilution

Volume de solution	0,5 %	1 %	1,5 %	2 %	3 %	4 %	5 %	10 %
1 litre	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	100 ml
2 litres	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	80 ml	100 ml	200 ml
3 litres	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	300 ml
4 litres	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	400 ml
5 litres	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	500 ml
10 litres	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml	1000 ml

Protocole de désinfection et de stérilisation des instruments

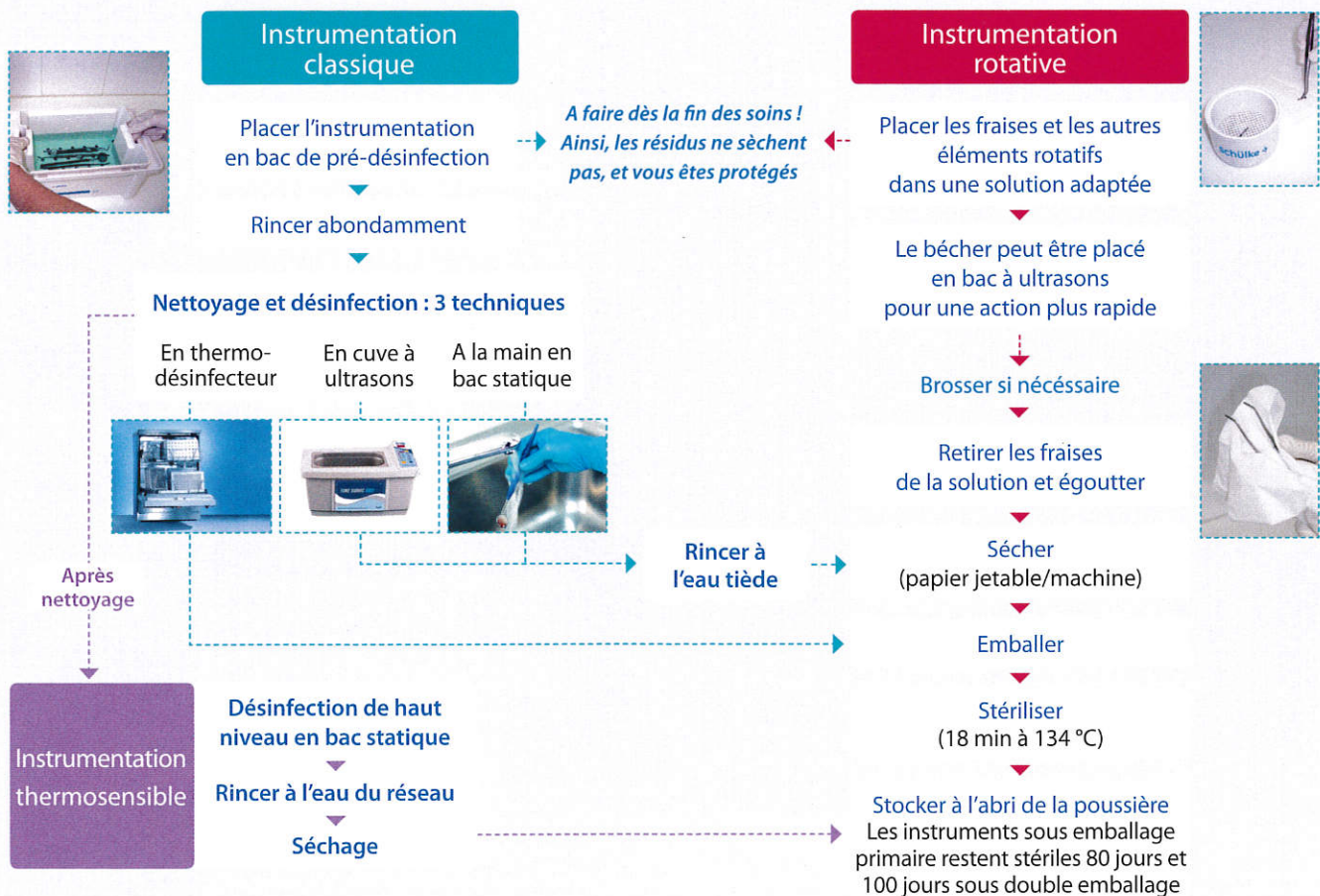

Selon les recommandations de la SF2H* et du Ministère de la Santé

* Société Française d'Hygiène Hospitalière

Produits biodégradables (OCDE 301D) / Emballages recyclables.

Marquage CE DQS 0297

DM fabriqués par Schulke & Mayr GmbH¹

Utiliser les DM avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

